

COVID-19:

Guía de uso de protección facial y ocular

Quienes lo deben usar en las instalaciones (en conjunto con la mascarilla):

- Personal que realiza chequeo de temperatura.
- Personas que realizan aseo, desinfección y sanitización.
- Personal que atienda a caso sospechoso o confirmado de COVID-19.
- Personas que se trasladen en transporte público (si hay personas en el transporte que no estén usando mascarilla).
- Personas que estén a menos de un metro de distancia de otras personas que no estén utilizando mascarilla.

Tipos de protección facial:



Lentes de seguridad



Lentes de seguridad
(sobre lentes ópticos)



Protector Facial

COVID-19:

Guía de uso de protección facial y ocular

1. Inspección:

Revisar cuidadosamente el estado de todas las piezas antes de su uso:

- Lentes de seguridad (protector ocular, protección lateral, puente nasal y claridad del lente).
- Protector Facial (ajustes de arnés, claridad y calidad de visor).

2. Limpieza:

- Realizar limpieza exhaustiva con agua y jabón especialmente después de su uso.

3. Almacenamiento:

- Guardar en un lugar donde se pueda evitar el deterioro de sus componente (condiciones ambientales, radiación solar, u otros factores que afecten las características del material, debilitando su estructura y resistencia).

4. Vida útil:

- Desechar elementos cuando:
 - Presenten dificultad de visibilidad.
 - Una o más de sus partes se encuentren rotas.
 - Deformación del ocular o visor.